




Protección Respiratoria

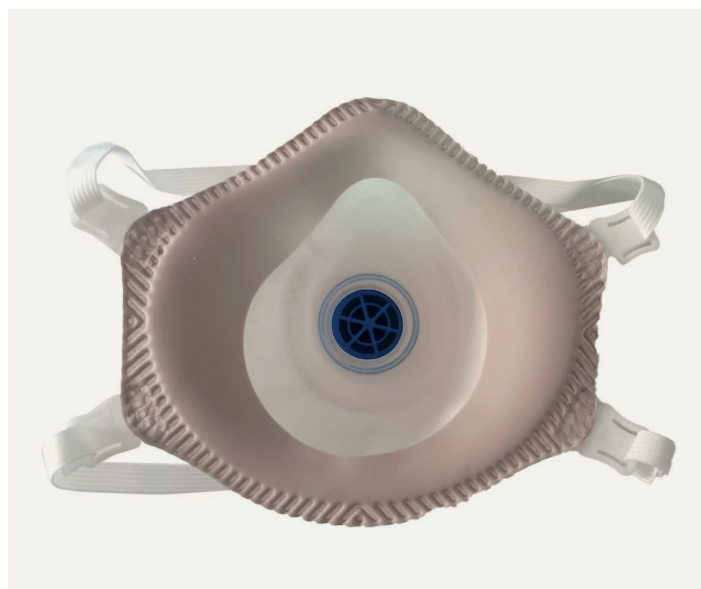


Descartable
tipo copa con válvula



CE 2834



Lea las
Instrucciones

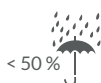

Humedad relativa máxima de las
condiciones de almacenamiento.



Rango de temperatura en
condiciones de almacenamiento



MM/AAAA
Fin de vida útil

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Respirador descartable FFP3 NR D con válvula
Referencia:	9319V
Tipo:	Descartable tipo copa con válvula
Grado:	FFP3 NR D
Normas:	EN 149:2001+A1:2009
Clase:	FFP3 NR (No reutilizable, con prueba de obstrucción - "D")
Color:	Blanco
Material:	Tela fundida 100% KN100 de 50 g/m ² , tela soplada en fusión
Eficiencia de filtración	FFP3 (≥99% de partículas)
Unidad de Empaque:	Caja por 10 unidades

DESCRIPCIÓN

La mascarilla filtrante de partículas 9319V es un respirador desechable tipo FFP3 NR con válvula, diseñado para brindar alta protección contra partículas sólidas y líquidas. Cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009 y ofrece una eficiencia de filtración ≥ 99%. Es ideal para ambientes con alta concentración de contaminantes no gaseosos.

CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección FFP3 NR D (no reutilizable, con prueba de obstrucción)
- Alta eficiencia de filtración ≥99%
- Cumple norma EN 149:2001+A1:2009
- Incluye válvula de exhalación para mayor comodidad respiratoria
- Clip nasal ajustable para mejor sellado facial
- Arnés elástico para la cabeza con ajuste seguro
- Diseñada para un solo turno de trabajo
- Ligera y cómoda de usar

MARCADO

Logo	_____	Semask
Referencia del producto	_____	9319V
Clase	_____	FFP3 NR
Información del NB	_____	CE 2834
Norma	_____	EN 149:2001+A1:2009





Protección Respiratoria



Descartable
tipo copa con válvula



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



1. Coloque la mascarilla filtrante de partículas sobre la nariz y la boca.
2. Pase la banda superior sobre la cabeza, posicionándola justo por encima de las orejas. Luego, pase la banda inferior sobre la cabeza y ajústela alrededor de la nuca.
3. Asegúrese de que el clip nasal esté bien moldeado alrededor de la nariz, apoyando los extremos contra las mejillas para lograr un buen sellado.

4. Para verificar el ajuste adecuado, cubra la mascarilla con ambas manos y exhale vigorosamente:
 - a) Si el aire se escapa por la zona de la nariz, ajuste el clip nasal.
 - b) Si el aire se escapa por los bordes, reposicione el arnés para un mejor ajuste.
5. Repita los ajustes hasta que la mascarilla quede bien sellada.

VERIFICACIONES ANTES DEL USO

- Para proteger su salud y evitar lesiones graves o la muerte, es importante leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas con el producto adjunto. Lea todas las advertencias impresas en la caja del embalaje.
- Como con cualquier dispositivo respiratorio, el usuario debe estar adecuadamente entrenado antes de su uso. Antes de usar, el usuario debe verificar que la mascarilla esté en buenas condiciones: sin suciedad, sin daños en los sujetadores de la cabeza, etc.
- El arnés para la cabeza debe estar bien sujeto.
- El clip nasal y la esponja deben estar correctamente adheridos a la mascarilla.

ADVERTENCIAS

- Esta mascarilla con la marca "NR" no debe utilizarse por más de un turno de trabajo.
- No sustituya, modifique, agregue ni omita partes de la configuración especificada por el fabricante.
- Esta mascarilla ayuda a proteger contra ciertos contaminantes particulados, pero no elimina por completo el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- No utilice la mascarilla filtrante de partículas con vello facial ni con ninguna otra condición que pueda impedir un buen sellado facial, ya que no se cumplirán los requisitos de estanqueidad.
- Deseche y reemplace la mascarilla si:
 - a) Se retira mientras se encuentra en áreas contaminadas.
 - b) Se obstruye y dificulta la respiración.
 - c) Se daña.

LIMITACIONES

No use el respirador ni ingrese o permanezca en un área contaminada bajo las siguientes circunstancias:

- a. La atmósfera contiene menos del 19,5% de oxígeno.
- b. Si percibe olor o sabor a contaminantes.
- c. Si los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
- d. En atmósferas explosivas.

ALMACENAMIENTO

La mascarilla no debe retirarse de su empaque hasta que sea necesario su uso y debe desecharse después de su uso.

Cuando no esté en uso, debe almacenarse en condiciones que eviten la deformación de la pieza facial y protegerla de la exposición excesiva al polvo, la luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva o productos químicos dañinos.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com

